

# Instruktions manual for:

Male Edge Basic, Male Edge Extra & Male Edge Pro



## Modtagelse af Male Edge

Male Edge leveres til dig samlet i en praktisk æske.




## Fleksibel gummirem

Hvis din penis er mere end 12,5 cm i slap tilstand, bør du flytte gummiremmen som anvist på billedet. Hvis din penis er mindre end 12,5 cm i længden, kan du med fordel lade Male Edge forblive i den oprindelige position.

**3**

### Placering af gummiring


Adskil frontstykket fra forlænger-stængerne og placer bundstykket ved roden af din penis. Lad den blive sådan under de næste trin.

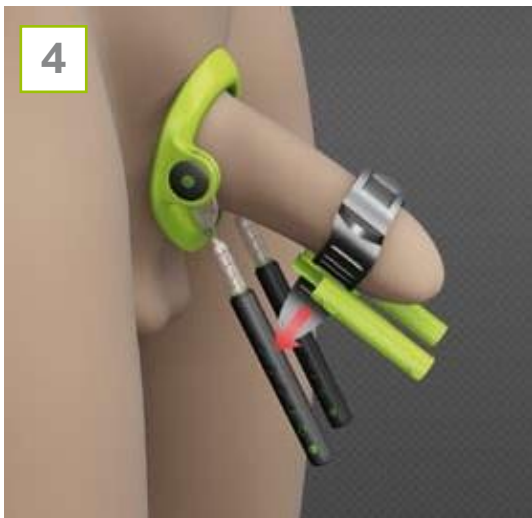**4**

### Tilpasning af frontstykket

Gummiremmen placeres og fastspændes under glansen. Gummiremmen bæres uden på forhuden, eller - hvis dette er mere behageligt for dig - med forhuden tilbagetrukket. Hvis du er omskåret, sættes gummiringen blot lige under glansen.

5

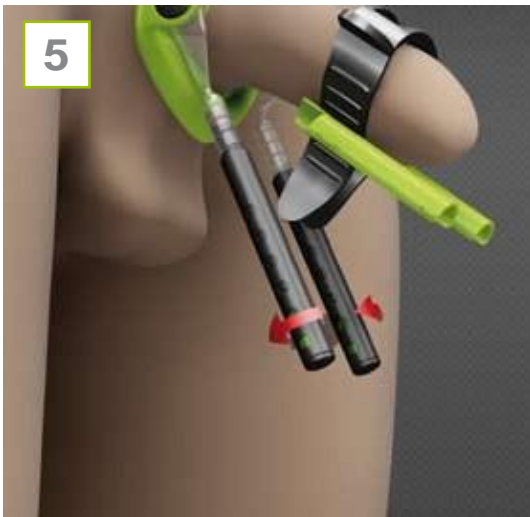

### Juster stængerne

Drej forlænger-stængerne med uret en kvart omgang og træk dem udad til den ønskede længde.


6



### Fastgør stængerne

Når du er tilfreds med længden og strækket fra forlænger-stængerne, drejes de tilbage mod uret igen. Når du hører et "dobbelt klik" er indstillingen låst.

7

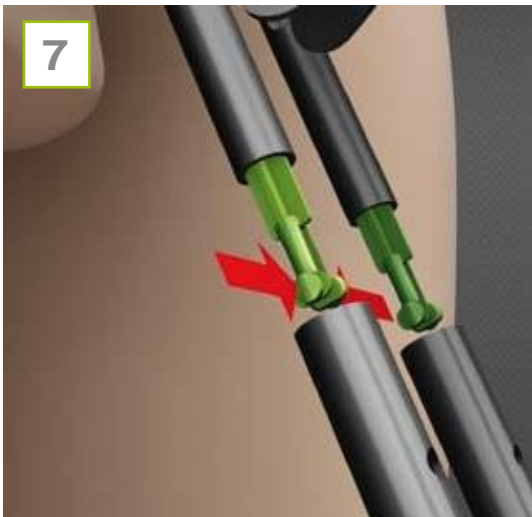

### **Må ikke overstrækkes**


Sørg for at stængerne ikke trækkes længere ud end til det sidste sæt huller. Hvis det alligevel skulle ske, så trykker du blot dobbelt-splitterne sammen og skubber dem tilbage på plads igen.

8



### **Fastgørelse til frontstykket**

Når forlænger-stængerne synes at være i den rigtige position for dig, skubber du dem forsigtigt tilbage mod frontstykket. Med et "klik" trykkes de atter sammen (se fig. 2).

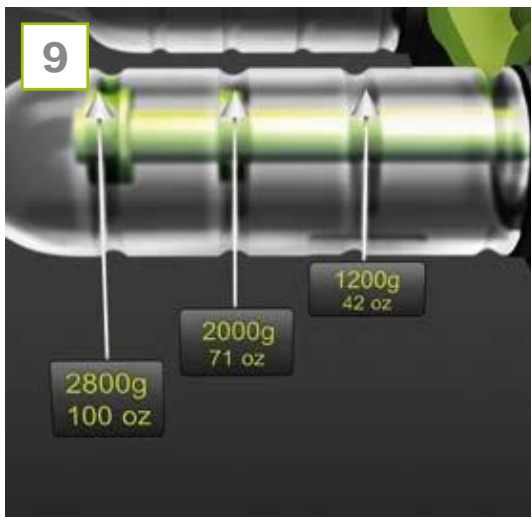

## Aflæsning af strækket

Aflæsning af strækkets intensitet gøres på de gennemsigtige cylindere, placeret mellem forlængerstængerne og bundstykket.



## Forøgelse af strækket

Forøg længden på stængerne ved forsigtigt at skubbe dem med tommelfingrene. Forlæng altid kun med et enkelt "klik" ad gangen og husk ikke at strække længere end til sidste hul på stangen.

## 11 Skema for opstart

Uge	Stræk/belastning	Timer/pr. dag
1	8-1200g / 28-42oz	1
2	8-1200g / 28-42oz	2
3	1200g / 42oz	3
4	1200g / 42oz	4
5	1200-2000g / 42-71oz	5
6	1200-2000g / 42-71oz	6

## 12 Anvendelse og vedligeholdelse af Male Edge

Male Edge er designet til at være fleksibel. Den kan manøvreres op og ned, så du herved kan vælge den mest behagelige position for dig. Hvis du ønsker at benytte Male Edge i løbet af dagen, kan den bæres under løstsiddende boxershorts og/eller bukser.

Den kan også benyttes om natten. Du skal dog være opmærksom på, at den ved urolig søvn kan falde af. Sker dette, påsættes den blot igen.

Male Edge er af høj kvalitet og kræver lav vedligeholdelse.

Det kan nemt og sikkert vaskes i hånden såvel opvaskemaskine. Sørg blot for under rengøringen at holde forlænger-stængerne adskilt fra frontstykket/gummiremme (Se fig. 3).

**Kontakt: [sales@maleedge.com](mailto:sales@maleedge.com) Telefon +45 45 200 300**